

els

extra low shrinkage®

NOUS N'AVONS JAMAIS ÉTÉ
AUSSI PRÈS DE LA NATURE!

NEW
FORMULA



Produit de qualité Suisse 
www.saremco.ch


SAREMCO
DENTAL

NOUS N'AVONS JAMAIS ÉTÉ AUSSI PRÈS DE LA NATURE!

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE®

Grâce à une nouvelle formulation et une meilleure aptitude au modelage SAREMCO a réussi à présenter un tout nouveau et brillant fruit issu de la poursuite du développement de son produit phare els extra low shrinkage®.

Sans éléments tels TEGDMA et HEMA et avec une très faible tension de contraction.

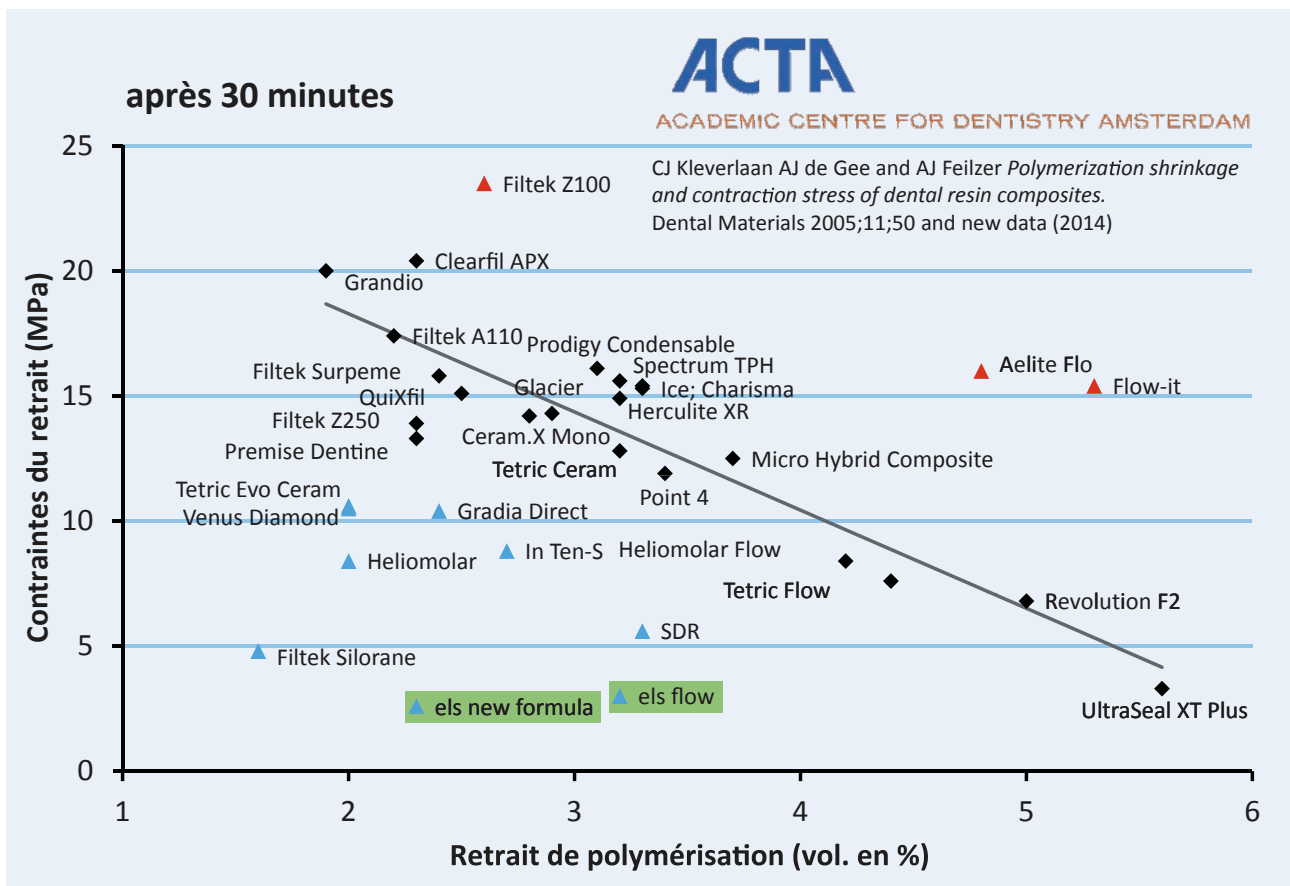

Analyse qualitative et quantitative d'éléments élués de composites dentaires.
(Reichl FX, Seiss M, Oxyinos A, Folwaczny M, Glas J, Kehe K, Hickel R (published IADR 2007))

Composites	Comonomères identifiés			
	eau distillée		méthanol	
	HEMA	TEGDMA	HEMA	TEGDMA
els extra low shrinkage® 2007	n.d*	n.d*	n.d*	n.d*
Grandio	n.d*	36 ± 5	n.d*	68 ± 12
Premise	n.d*	48 ± 7	n.d*	51 ± 9
Tetric Evo Ceram	n.d*	57 ± 12	496 ± 77	n.d*
Synergy Duo Shade	n.d*	104 ± 16	n.d*	126 ± 23
Gradia	n.d*	123 ± 18	500 ± 66	62 ± 2
Venus	n.d*	197 ± 26	n.d*	76 ± 7
els extra low shrinkage® (new formula, extrait 2014)	n.d*	n.d*	n.d*	n.d*

* n.d. = non détectés (inférieur au seuil de détection)

ÉTUDE DE CAS CLINIQUE CONCERNANT LE NOUVEAU ELS EXTRA LOW SHRINKAGE®



État initial
restaurations en amalgame
dégradées et datant de
35 ans sur les dents 14 et 15



Préparation
excavation et limites de
préparation achevées



Mordancer avec cmf etch
cavité préparée avec une
matrice partielle, un
anneau séparateur, la digue
et mordantage intégral



**Reconstitution avec
els extra low shrinkage®**
reconstruction en plusieurs
strates (els new formula)
Teinte A3



Reconstitution achevée
stratification achevée avant
l'usinage, sillons avec
colorant SAREMCO brun



Résultat final
obturation anatomiquement
correcte après usinage et
polissage

Série d'illustrations d'un cas clinique du Dr Christoph Pröbstl, Wurmlingen près de Tuttlingen (D), mars 2014

Information pour la commande d'els extra low shrinkage®

Teinte	Seringue 1x4g	Compules 20x0.37g
	REF	
A1	7103	7123
A2	7104	7124
A2op.	7056	7076
A3	7101	7121
A3op.	7105	7125
A3.5/B4	7106	7126
A4	7057	7077
A4op.	7060	7061
B1	7108	7128
B2	7107	7127
B3	7102	7122
C2	7109	7129

Teinte	Seringue 1x4g	Compules 20x0.37g
	REF	
C3	7059	7079
C4	7050	7070
D3	7110	7130
RB	7051	7071
RBop.	7062	7063
IA	7064	7065
IB	7052	7072
IT	7058	7078
SW	7055	7075
SW -	7066	7067
SW +	7068	7069

els introkit tips 6 x 10 Tips à 0.37g (A1, A2, A3, A3op., A3.5/B4, B2) 7160

SAREMCO

DENTAL



VERS LE SUCCÈS AVEC UN NOUVEL ASPECT RADIEUX ET DES PRODUITS OPTIMISÉS!

27 ans après la création de l'entreprise, SAREMCO Dental se présente en 2014 sous une toute nouvelle image resplendissante. Le nouveau logo et la présentation nouvelle sont en harmonie avec les produits de grande qualité destinés à l'obturation dentaire. L'entreprise s'est transformée au cours des dernières années en une valeur sûre dans son domaine de par un grand savoir faire dans le secteur de la chirurgie dentaire. Avec des produits brillants tel le composite «els extra low shrinkage®» SAREMCO

Dental est dans le vent et offre aux patients et aux utilisateurs présentant des allergies avérées des solutions en matière de composites exemptes de TEGDMA et d'HEMA. Visitez la toute nouvelle page internet www.saremco.ch et laissez-vous convaincre par les produits suisses de grande qualité.

SAREMCO Dental – Nous n'étions encore jamais aussi proche de la nature.